


EVAC MAT ist eine spezielle Rettungsmatte, die unter bereits bestehende Matratzen gelegt wird und dient zur Evakuierung von Patienten in Notfällen über das Stiegenhaus. Die **EVAC MAT** wird einfach über Spanngummis auf der Matratze fixiert und ist dadurch immer einsatzbereit.

Das sind die Vorteile:

- Das Evakuierungssystem für immobile Patienten/Bewohner, im Notfall unabhängig vom Lift einsetzbar
- Schnelle Evakuierung durch **einen** Retter (auch über das Stiegenhaus)
- Sichere Lagerung und Fixierung des Patienten/Bewohners durch 2-fach-Gurtsystem
- Optimale Versorgung
- Einfache und sichere Handhabung, geeignet für Patientengewicht bis max. 150kg
- Evakuierungssystem **EVAC MAT** ist schwer entflammbar
- bei bereits bestehenden Matratzen einsetzbar

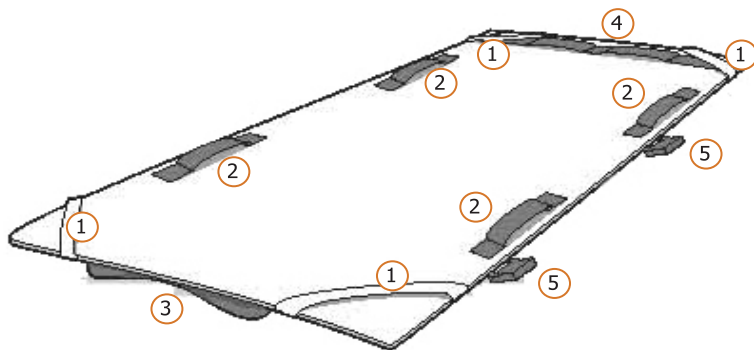

Einfache Fixierung der Matratze durch Spanngummis an allen vier Ecken.



4 Trageschlaufen zum Herausheben des Patienten aus dem Bett.



Steuer-/Bremsschleife für besonders schwere Patienten sowie zur Steuerung in beengten Umgebungen.



Doppelgriff zum Herausheben der Matratze wenn nur eine Person zur Verfügung steht. Wird gleichzeitig als Zugschleife verwendet.




Sichere Fixierung der Gurtbänder in Tunnelzügen im täglichen Gebrauch...

Wäsche und Desinfektion für **EVAC TWIN** & **EVAC MAT**:

Beide Systeme sind für Wäsche- und Desinfektionsverfahren bis 105°C geeignet. Empfehlenswert ist das VDV Verfahren. Als schnelle Zwischendesinfektion bietet sich der Einsatz von verschiedenen Desinfektionsmitteln an (Deklaration der geeigneten Desinfektionsmittel sind erhältlich unter med@moltoplast.com).



Gebrauchsanweisung für: **EVAC TWIN** und **EVAC MAT** bei Evakuierung des Patienten durch 1 Person:

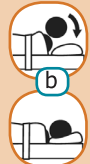

- Ziehen Sie einen Gurt nach dem anderen aus den Tunnelzügen und schließen Sie die Klettbänder über der Bettdecke, so dass diese eng anliegen aber nicht einschneiden. **Achten Sie darauf, dass sich die Hände des Patienten/ Bewohners unter der Bettdecke befinden.**
- Bitten Sie den Patienten/Bewohner während der gesamten Räumung den Kopf locker auf dem Kissen liegen zu lassen und nicht den Kopf anzuheben.
- Greifen Sie nun die Schlaufe am Fußende der Evakuierungsmatte und ziehen Sie die **EVAC TWIN / EVAC MAT** leicht nach oben und zu sich hin. Drehen Sie anschließend den Patienten/Bewohner samt Matratze und Evakuierungssystem im 60°-Winkel zum Bett. Ziehen Sie den Patienten/Bewohner mit einem Gleiten aus dem Bett.
- Ziehen Sie den Patienten/Bewohner entsprechend Ihres Evakuierungsplanes aus dem Gefahrenbereich. Halten Sie Sichtkontakt zum Patienten/Bewohner.
- Treppenhäuser und Stufen können zügig passiert werden.
Durch das besondere Material der **EVAC TWIN** & **EVAC MAT** und die Matratze ist der Patient/Bewohner sicher und bequem geschützt.
- Bei schweren Patienten/Bewohnern oder in beengten Umgebungen kann ein weiterer Retter am Kopfende an der Steuer-/Bremsschleife Hilfestellung leisten.